


# KURZANLEITUNG- TIPS UND TRICKS COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST



Inhalt: Test cassette, Nasentupfer, Pufferflüssigkeit, Reagenzröhrchen, Reagenzröhrchen Kappe, Bedienungsanleitung.

Bitte lesen Sie vor dem Testen die gesamte Gebrauchsanweisung. Diese Kurzanleitung ist kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung.


1. Stellen Sie das Reagenzröhrchen senkrecht in einen Röhrchenhalter. Geben Sie die Pufferflüssigkeit in das Reagenzröhrchen.
2. Entfernen Sie die Testkassette aus dem Folienbeutel. Stellen Sie es auf eine horizontale Basis.
3. Entfernen Sie den Nasentupfer von der Folie.

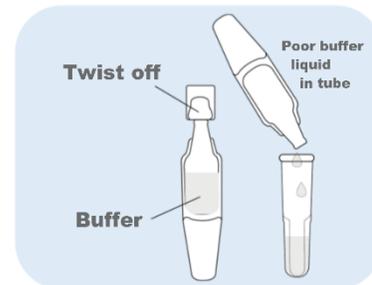


4. Nehmen Sie die Probe mit dem Tupfer gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung aus der Nase. Führen Sie den Tupfer in beide Nasenlöcher ein. Die Spitze sollte **bis zu 2,5 cm** vom äußeren Rand des Nasenlochs entfernt eingeführt werden. Rollen Sie den Tupfer fünfmal entlang der Schleimhaut im Nasenloch, um sicherzustellen, dass sowohl Schleim als auch Zellen gesammelt werden.



5. Stecken Sie die Spitze des Tupfers bis zum Boden in das Reagenzglas, drehen Sie ihn fünfmal und bewegen Sie ihn 20 Sekunden lang auf und ab. Entfernen Sie den Tupfer, während Sie den Boden des Röhrchens zusammendrücken. Setzen Sie die Kappe mit der Pufferflüssigkeit und der Probe auf das Reagenzröhrchen.

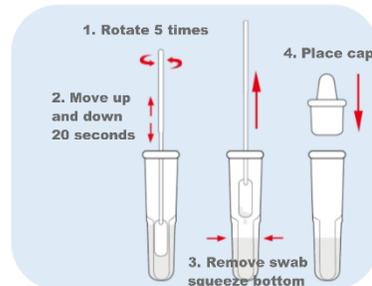

6. Geben Sie 3 Tropfen der Pufferflüssigkeit mit der Probe in das Tropfloch der Kassette.

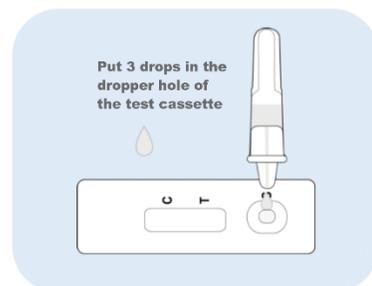

7. Warten Sie 15 Minuten, um das Testergebnis zu lesen. Lesen Sie das Testergebnis zwischen 15 und 20 Minuten ab.



8. Lesen und vergleichen Sie die Testergebnisse aus der Bedienungsanleitung.

