


Inhoud: Joysbio Antigeen testcassette, wattenstaafje, buffer vloeistof, testbuisje met dop, gebruiksaanwijzing.

Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat je begint met testen. Deze snelgids is geen vervanging van de gebruiksaanwijzing.


1. Plaats het testbuisje verticaal in een buisjeshouder. Doe de buffervloeistof in het testbuisje.
2. Haal de Joysbio testcassette uit de folieverpakking. Plaats de testcassette op een horizontale ondergrond.
3. Haal het wattenstaafje uit de verpakking. Markeer 2,5 cm op het wattenstaafje (zie afbeelding).



4. Neem het neusslijmmonster af met het wattenstaafje: Steek het wattenstaafje in beide neusgaten tot **maximaal 2,5 cm** vanaf de buitenrand van het neusgat. Rol het wattenstaafje 5 keer langs het slijmvlies in het neusgat, zodat zowel slijm als cellen worden verzameld.

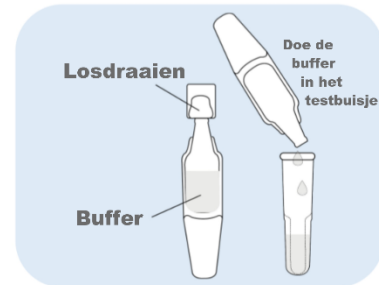

5. Plaats de tip van het wattenstaafje in het testbuisje geheel naar beneden in de buffervloeistof en draai 5 keer en beweeg het op en neer voor 20 seconden. Verwijder het wattenstaafje uit het buisje terwijl je het testbuisje samenknijpt om het wattenstaafje uit te wringen. Plaats de dop op het testbuisje.

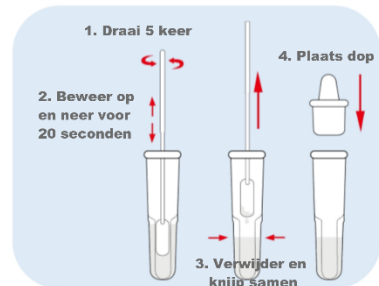

6. Doe 3 druppels van de buffervloeistof met het neusslijm in het druppelgat van de testcassette.



7. Wacht 15 minuten voordat je de testuitslag afleest. Lees het testresultaat tussen de 15 en 20 minuten af.



### Uitslag

